

## <商品説明書>

薬事非該当品

手術用器具先端保護

### チップカバー

本製品は手術用器具の先端の保護・損傷防止を目的としたものです。  
再使用可能で、オートクレーブ・EOGガス滅菌対応可能です。

#### ⚠ 使用上のご注意

- ・ 体内には使用しないこと。
- ・ 先端が鋭利な器具に装着する場合、本品を突き破らないように注意してください。
- ・ 本品が器具先端のサイズに合わない場合、滅菌時の陰圧により破裂する恐れがあります。  
また、使用時や滅菌時に先端が鋭利な器具により本品に亀裂が生じたり、本品が外れたりする可能性があります。
- ・ 光にあてると化学反応を起こし劣化する場合があります。
- ・ 繰り返しの使用等により劣化が見られた場合は、使用せず廃棄してください。

#### 原材料

- ・ 塩化ビニル (PVC)

#### 使用方法

- ・ 器具先端のサイズに合わせて、適切なサイズの本品を選択する。
- ・ 器具を洗浄し、その先端に本品を装着する。

#### 保管方法

- ・ 高温・多湿を避け、遮光された環境で保管してください。



販売業者：株式会社メディソレーユ  
連絡先：03-5842-5081